

# 3Shape

## Import guide



**ZERAMEX**  
natürlich, weisse Implantate

## Wie wird die Bibliothek in Ihr 3Shape System importiert?

1. Öffnen Sie das 3Shape Dental System Control Panel
2. Werkzeuge ► Import/Export ► Material importieren
3. Wählen Sie "zeramex\_xt\_3shape\_v5.dme". Sichern und schliessen Sie "3Shape Dental System Control Panel".
4. Sie haben erfolgreich die Zeramex XT Zerabase Bibliothek installiert.

Bitte wenden Sie sich bei **Fragen zum Import** der Daten in Ihre Software an den **Support Ihres CAD/CAM-Anbieters oder Verkäufers (support@3shape.com)**.

Bestellen Sie die zur Versorgung benötigten Teile direkt bei Zeramex.

### Bestell-Hotline

T 00800 – 93 55 66 37

F 00800 – 93 55 63 77

[order@zeramex.com](mailto:order@zeramex.com)

