

# Zeramex XT Exocad

Workflow Zeramex Digital Solutions



**ZERAMEX**  
natürlich, weisse Implantate


# Index

1. Zeramex Digital Solutions Workflow mit Exocad	3
1.1 ZDS Individuelles Abutment / Individuelle Krone (einteilig)	3
1.2 Wo befindet sich die Datei, und was müssen Sie senden	6
1.3 Individuelle Krone für Zerabase / Zerabase X	6
1.4 Weitere Informationen	8

# 1. Zeramex Digital Solutions Workflow mit Exocad


Nach Installation der Zeramex XT Exocad-Bibliothek im System wird die Bibliothek in Ihrer DentalCAD App angezeigt. Für Informationen über die Installation beachten Sie bitte das Dokument „Zeramex XT Implantatbibliothek für Exocad“ auf unserer Website.

Laden Sie die Scandaten des Patienten/Falls, für den ein geeignetes Produkt entwickelt werden soll.

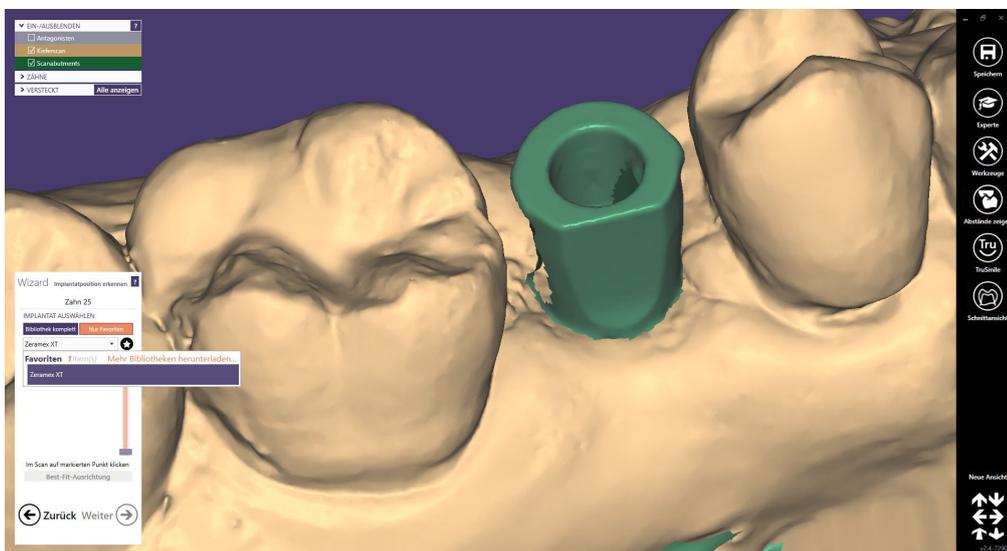


Fügen Sie die Zeramex XT-Bibliothek zu Ihren Favoriten hinzu, um schneller darauf zugreifen zu können.

## 1.1 ZDS Individuelles Abutment / Individuelle Krone (einteilig)

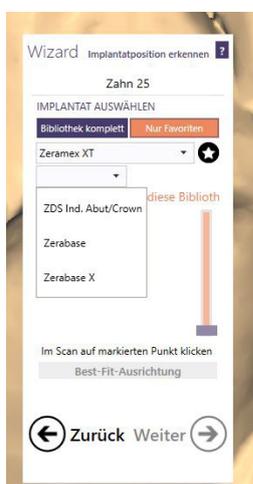

Wählen Sie die ZDS-Bibliothek Ind. Abutment/ Krone, um ein/e einteilige/s Abutment oder Krone zu bestellen.

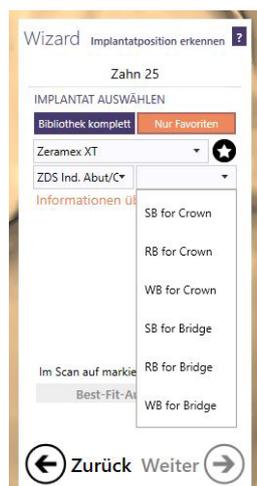

Wählen Sie die richtige Design-Datei entsprechend Ihrem gewünschten Artikel aus dem Bestellformular aus.


ZDS Artikelnummer	Auszuwählende Exocad-Datei
SB15551 (Individuelles Abutment)	SB für Krone
RB16551 (Individuelles Abutment)	RB für Krone
WB17551 (Individuelles Abutment)	WB für Krone
SB15560 (Monolithische Krone)	SB für Krone
RB16560 (Monolithische Krone)	RB für Krone
WB17560 (Monolithische Krone)	WB für Krone

Gestalten Sie Ihr Produkt nach Ihren Erfordernissen. Hilfe finden Sie im Exocad-Handbuch oder Sie wenden sich an Ihren offiziellen Exocad-Händler. *(Zeramex Digital Solutions ist nicht für das Design Ihrer Produkte verantwortlich.)*



## 1.2 Wo befindet sich die Datei, und was müssen Sie senden

Die stl-Modelldatei Ihres Designs befindet sich in Ihrem Projektordner.

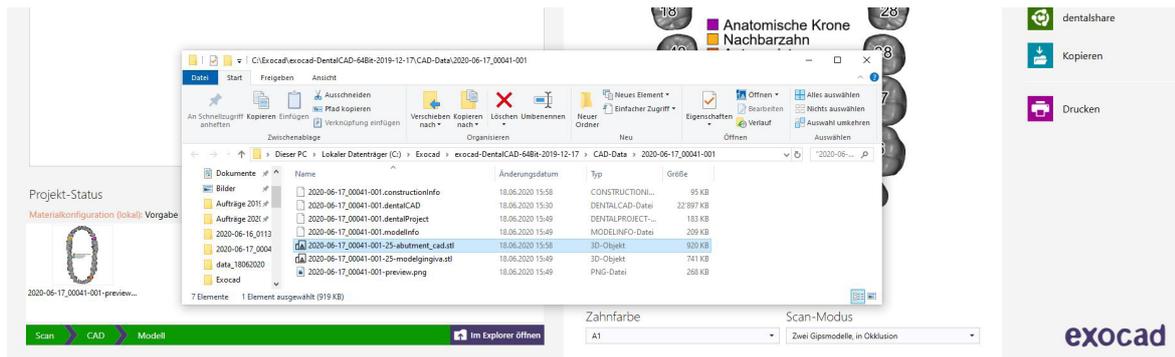

Wenn Sie ein 3D-Modell oder den Ober- und/oder Unterkiefer (ZDS-Bestellnummer RB16570) bestellen möchten, müssen Sie möglicherweise auch die vorbereiteten Daten aus dem Modellgestalter übermitteln.



## 1.3 Individuelle Krone für Zerabase / Zerabase X

Wenn Sie eine Krone oder Brücke für das Zerabase- oder das Zerabase X-Abutment bestellen möchten, wählen Sie die entsprechende Bibliothek.


Wählen Sie die richtige Design-Datei entsprechend Ihrem gewünschten Artikel aus dem Bestellformular:

ZDS Artikelnummer	Auszuwählende Exocad-Datei	Kompatibles Abutment
SB15552 oder SB15553	Zerabase X – SB15535 (SB für Krone)	SB15535
	Zerabase X – SB15536 (SB für Brücke)	SB15536
RB16552 oder RB16553	Zerabase X – RB16535 (RB für Krone)	RB16535
	Zerabase X – RB16536 (RB für Brücke)	RB16536
WB17552 oder WB17553	Zerabase X – WB17535 (WB für Krone)	WB17535
	Zerabase X – WB17536 (WB für Brücke)	WB17536

ZDS Artikelnummer	Auszuwählende Exocad-Datei	Kompatibles Abutment
RB16552 oder RB16553	Zerabase – RB16530 (RB für Krone)	RB16530
	Zerabase – RB16531 (RB für Brücke)	RB16531
WB17552 oder WB17553	Zerabase – WB17530 (WB für Krone)	WB17530
	Zerabase – WB17531 (WB für Brücke)	WB17531

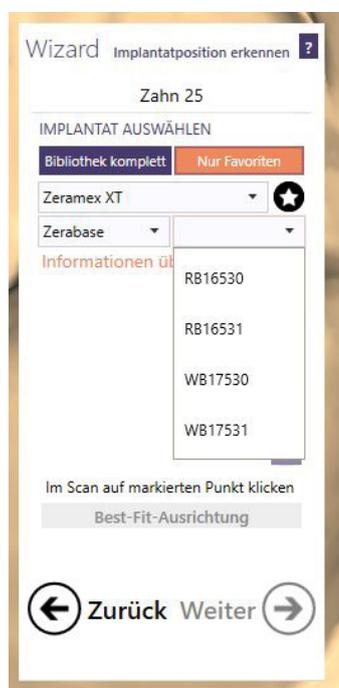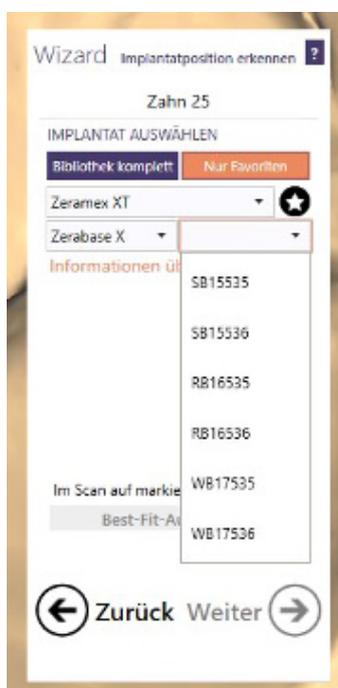

Wählen Sie das gewünschte Unterteil für das entsprechende Abutment und gestalten Sie Ihre Krone oder Brücke.

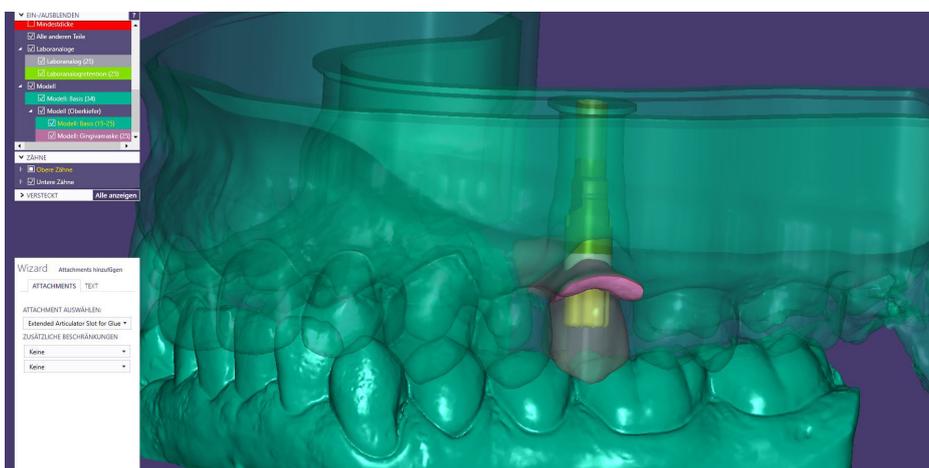

## 1.4 Weitere Informationen

Bei weiteren Fragen lesen Sie sich bitte die häufig gestellten Fragen (FAQ) oder unsere Website durch. Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen oder Probleme mit dem Zeramex Digital Solution-Workflow haben, wenden Sie sich bitte an die Helpline, Telefon 00800 0400 1333.

